

PD-NTS-PWF

Technický list / Informace pro uživatele

Datum: 03.05.2019

Údaje o výrobku

Artikl: PD-NTS-PWF Nitrilové nepudrované vyšetřovací rukavice, modré, SOFT

Standardy:

Směrnice Rady 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích

EN455-1/2/3/4 Lékařské rukavice pro jednorázové použití

Směrnice Rady 89/686/EEC o osobních ochranných prostředcích

EN374:2003 část I, II a III Rukavice chránící proti chemikáliím a mikroorganismům

EN420:2010 - Ochranné rukavice - všeobecné požadavky

EN388:2003 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Popis

Jednorázové použití: ano

Potravinářství: ano

Barva: kobaltově modrá

Povrch rukavic: Texturovaný na koncích prstů

Tvar: univerzální, vhodné pro pravou i levou ruku

Okraj: rolovaný

Země původu: Malajsie

Velikost	Délka (mm)	Šířka dlaně (mm)	Tloušťka (mm)		
			Dlaň	Prostředník	Manžeta
XS (5/6)	240	70-79	0,05	0,09	0,05
S (6/7)	240	80-89	0,05	0,09	0,05
M (7/8)	240	90-99	0,05	0,09	0,05
L (8/9)	240	100-109	0,05	0,09	0,05
XL (9/10)	240	110-119	0,05	0,09	0,05

Velikost	Označení artiklu	kusů v krabičce	krabiček v kartonu	kusů v kartonu
XS (5/6)	PD-NTS-PWF/XS	100	10	1000
S (6/7)	PD-NTS-PWF/S	100	10	1000
M (7/8)	PD-NTS-PWF/M	100	10	1000
L (8/9)	PD-NTS-PWF/L	100	10	1000
XL (9/10)	PD-NTS-PWF/XL	100	10	1000

NORMA	ZKOUŠKA	VÝSLEDEK			SOUBOR
93/42/CEE					
EN455-1	Nepropustnost	Stupeň ochrany 1: AQL=1,5			Příloha 1 CIMAC Protokol o zkoušce RP 2013/0774-2- RP-1
EN455-2	Síla roztržení				
	Před stárnutím	≥ 6N			
	Po stárnutí	≥ 6N			
	Poměrné prodloužení při roztržení				
	Před stárnutím	350%			
Po stárnutí	320%				

EN455-3	Přítomnost pudru	< 2mg/rukavici			
	Přítomnost proteinů	nedetekovatelné			
EN455-4	Záruka kvality	5 let			
89/686/CEE					
EN374-1	Terminologie	v souladu			Příloha 1
EN374-2	Odolnost proti penetraci - voda	v souladu			
EN374-2	Odolnost proti penetraci - vzduch	v souladu			
EN16523-1		Permeace (min)	Index	Degradace (%)	CIMAC protokol o zkoušce 2018/1193-1 rp-1 z 31/05/2018
	(L) Kyselina sírová 96%	35	2	90	
	(K) Hydroxid sodný 40%	35	2	44	
	(G) Diethylamine	35	2	75	
	(J) N-Heptane	35	2	63	
ISO10993-1	Cytotoxicita	v souladu			
	Citlivost	v souladu			
	Podráždění	v souladu			
EN388	Odolnost proti oděru	třída 0			
	Odolnost proti řezu	třída 0			
	Odolnost proti trhání	třída 0			
	Odolnost proti propíchnutí	třída 0			
EN420	Všeobecné požadavky	OK			
ASTM D 6978-05	Odolnost vůči průniku cytostatik	Testováno			
ASTM F1671-07	Virová penetrační metoda	Testováno			
1935/2004/CE	Migrační test	Testováno			Příloha 5
Cytotoxic agent			Index výkonnosti		
Carmustine (BCNU), 3.3 mg/ml (3,300 ppm)			0		
Cisplatin, 1.0 mg/ml (1,000 ppm)			5		
Cyclophosphamide (Cytoxan), 20.0 mg/ml (20,000 ppm)			5		
Dacarbazine (DTIC), 10.0 mg/ml (10,000 ppm)			5		
Doxorubicin Hydrochloride, 2.0 mg/ml (2,000 ppm)			5		
Etoposide (Toposar), 20.0 mg/ml (20,000 ppm)			5		
Fluorouracil, 50.0 mg/ml (50,000 ppm)			5		
Paclitaxel (Taxol), 6.0 mg/jl (6,000 ppm)			5		
Thiotepa, 10.0 mg/ml (10,000 ppm)			2		

Doba působení (min)	Index výkonnosti
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

Složení: Nitrile, Phtalocyanine blue, Oxyde de Zinc, Sulphure, Dioxide de titanium, Zinc dibutyldithiocarbamate, Hydroxyde de potasium

Latex: NE

Vulkanizační činidlo: NE

Produkty zvířecího nebo biologického původu: NE

Skladování:

Chraňte před vlhkem a slunečním svitem. Skladujte při teplotě mezi 10°C a 25°C.

Jen pro jednorázové použití.

Záruka kvality: 5 let

Výrobce

Jméno firmy: Laboratories EUROMEDIS

Adresa: Z.I. de la Tuilerie, 60290 NEUILLY-SOUS-CLERMONT, France

Kontaktní osoba: Mr. Eddie Zerbib, Quality Manager

Tel.: +33 344728360

Fax: +33 344735732

e-mail: euromedis@euromedis.fr

web: www.euromedis.fr

Distributor

Jméno firmy: PROFOD s.r.o.

Adresa: Malešická 546/71, 108 00 PRAHA 10, Czech Republic

Tel.: +420 777811709

e-mail: info@profod.com

web: www.profod.com

PROFOD s.r.o.
 Sídlo společnosti
 Malešická 546/71, 108 00 Praha 10
 IČ: 27179397, DIČ: CZ27179397
 Provozovna:
 Pražská 1470/18b, 102 00 Praha 15
 Tel.: +420 222 514 787 Fax: 226 202 260

